

LQD®

SPRAY

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen enthält, die Sie bei der Anwendung dieses Medizinprodukts beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.


HINWEIS

Für eine einfache Handhabung der Sprühflasche ist eine gewisse Flaschengröße notwendig. Aus diesem Grund ist die Flasche mit 7 ml Inhalt teilbefüllt. Dies stellt keinen Mangel dar.

PRODUKTBE SCHREIBUNG UND WIRKUNG

Das Verbandmittel LQD® Spray enthält Chitosan-FH02® in wässriger, pH-hautneutraler Lösung. Das Spray bildet nach Antrocknung einen dünnen, elastischen, transparenten Film, der im Rahmen der üblichen Wundreinigung entfernt wird oder auf der Wunde verbleiben kann, bis er bei der natürlichen Hauterneuerung abgestoßen wird. In seiner Eigenschaft als Spray eignet sich das Produkt auch für die Behandlung schwer erreichbarer, unebener Wunden.

Chitosan besteht aus den Zuckerbausteinen Glucosamin und N-Acetyl-Glucosamin, welche natürlicherweise auch im menschlichen Körper vorkommen, und verfügt dadurch über eine ausgezeichnete Bioverträglichkeit. Das in LQD® Spray verwendete Chitosan-FH02® wurde in einer speziell für die Anforderungen der Wundheilung benötigten Form aus Garnelenschalen hergestellt. Studien belegen die Wirksamkeit und Verträglichkeit von LQD® Spray.

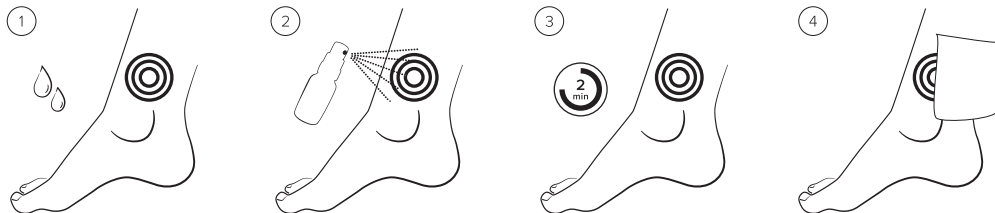

ANWENDUNG

Die Wunde sollte nach derzeitigem Expertenstandard gereinigt werden.

Vor dem ersten Gebrauch Sprühkopf ca. 5-mal betätigen, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel austritt. Wenden Sie sich dabei von Personen ab, die das Spray möglicherweise einatmen könnten. Danach ist das System für jede weitere Anwendung gebrauchsfertig.

Die Wunde wenn möglich in eine waagerechte Position bringen und gleichmäßig aus ca. 10 cm Abstand mit LQD® Spray besprühen.

Den Sprühfilm mindestens zwei Minuten unbedeckt einwirken lassen.

Gegebenenfalls kann die Wunde mit einem geeigneten Sekundärverband abgedeckt werden.

Bitte nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen, um ein Verkleben des Sprühkopfs zu verhindern.

INDIKATIONEN

Das Verbandmittel LQD® Spray dient zur äußeren, lokalen Behandlung von chronischen Wunden (wie z.B. Ulcus cruris), sekundären Wundheilungsstörungen, akuten Wunden und Brandwunden 1. und 2. Grades.

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT

LQD® Spray kann als primäre Wundauflage bei jedem Verbandwechsel angewendet werden.

ANWENDUNGSHINWEISE

Bei Anwendung mit Hydrogelen und Hydrokolloidverbänden sowie bei stark exsudierenden Wunden kann LQD® Spray seine Wirkung nicht voll entfalten. Starke Fibrinbeläge und Nekrosen müssen abgetragen werden (Debridement).

LQD®

SPRAY

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

KONTRAINDIKATIONEN

Bisher sind keine Kontraindikationen bekannt.

NEBENWIRKUNGEN

In seltenen Fällen kann es beim Auftragen zum Verspüren eines vorübergehenden leichten Brennens und zum Auftreten temporärer Hautrötungen kommen.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung laut Indikation sind bisher keine allergischen Reaktionen im Zusammenhang mit LQD® Spray beschrieben worden.

Unverträglichkeitsreaktionen sind jedoch nicht mit letzter Sicherheit auszuschließen.

WARNHINWEISE/VORSICHTSMAßNAHMEN

Wundkontakt mit dem Pumpkopf vermeiden.

Falls die Flasche oder das Pumpsystem beschädigt sind, sollte LQD® Spray vorsichtshalber nicht mehr verwendet werden.

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Das Einatmen oder eine orale Aufnahme eines Sprühstoßes sollte immer vermieden werden. Besondere Vorsicht ist bei Anwendern als auch bei Personen geboten, die sich bei der Anwendung des Sprays in unmittelbarer Nähe befinden und bei denen eine Allergie gegen Schalentiere bereits bekannt ist oder vermutet wird.

Nicht in die Augen sprühen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Über die Anwendung von LQD® Spray bei Schwangeren und stillenden Müttern liegen keine Daten vor.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Die Haltbarkeit ist auf dem Etikett und der Verpackung angegeben.

LQD® Spray bei Raumtemperatur (15 bis 25°C) lagern.

Aufgrund des speziellen Pumpkopfsystems bleibt der Inhalt auch nach Anbruch für den weiteren Gebrauch steril.

Nach Anbruch innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen.

ZUSAMMENSETZUNG

Sterile Chitosan-Acetat-Lösung 0,75 %.
(Chitosan aus Schalentieren)

Enthält keine Konservierungsmittel.

DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Pump-Sprühflasche mit 7/12/20 ml Lösung.

Hinweis: Zur einfacheren Handhabung größeres Flaschenvolumen mit Teilbefüllung bei 7 ml.

HERSTELLER

Medoderm GmbH
Robert-Koch-Str. 50 D
55129 Mainz, Deutschland

 0482

 QD-DE-I-Z-006

STAND DER GEBRAUCHSINFORMATION

November 2019

WWW.LQDSPRAY.COM